

Audiol®

SPRAY À L'HUILE D'OLIVE

Audiol® est une méthode simple et efficace pour ramollir ou éliminer le cérumen de manière naturelle, réduisant ainsi le besoin de recourir à une seringue pour effectuer un lavage auriculaire, ou facilitant son recours si cette procédure s'avérait nécessaire. Le spray Audiol® possède un mode d'administration simple et unique ; le produit permet d'administrer une dose discrète d'huile d'olive dans l'oreille externe, ce qui facilite l'utilisation du produit, empêche toute application excessive et est moins salissant.

Il a été cliniquement prouvé que l'huile d'olive permettait d'empêcher la peau de se dessécher, aidant ainsi à prévenir les démangeaisons et les irritations dans les oreilles.

Prière de lire attentivement cette notice avant d'utiliser Audiol®.

CONTENU DE CETTE NOTICE :

1. Avant d'utiliser un nouveau flacon d'Audiol®
2. Instructions d'utilisation
3. Informations supplémentaires
4. Mises en garde

1. Avant d'utiliser un nouveau flacon d'Audiol® :

- Avant d'utiliser un nouveau flacon d'Audiol®, réchauffer le produit entre les paumes des mains, bien agiter le produit, puis appuyer sur la tête de pulvérisation 3 à 4 fois jusqu'à ce qu'une fine brume soit produite (voir le schéma b). Ce faisant, veiller à ne pas pointer la tête de pulvérisation vers soi-même ou vers qui que ce soit d'autre. Cette procédure permettra d'amorcer le système et de veiller à ce que le produit soit prêt à l'emploi.

2. Instructions d'utilisation :

- Audiol® est plus efficace lorsqu'il a été réchauffé entre les paumes des mains et que le flacon a bien été agité avant l'emploi.
- Appliquer le spray Audiol® en suivant les instructions de son médecin, son audioprothésiste ou son infirmier.
- Chez les adultes et les enfants âgés de plus de 12 ans, 1 à 2 applications d'Audiol®, deux fois par jour, pendant 4 ou 5 jours, seront requises avant toute consultation pour le retrait du cérumen.
- Audiol® peut être utilisé chez les enfants âgés d'un an ou plus.
- Par la suite, le médecin, le pharmacien, l'audioprothésiste ou l'infirmier conseillera peut-être d'utiliser Audiol® une fois par semaine, à titre de mesure préventive.
- Tirer le pavillon auriculaire vers le haut et vers le bas (voir le schéma a).
- En maintenant le flacon en position verticale, avec l'embout placé à l'intérieur du conduit auditif, appuyer sur la tête de pulvérisation 1 à 2 fois (voir le schéma b).
- Masser délicatement le tragus, sur le devant de l'oreille (voir le schéma c).
- Répéter la procédure avec l'autre oreille, si nécessaire.
- La tête de pulvérisation peut être retirée et rincée à l'eau chaude après chaque utilisation, puis placée de nouveau sur le flacon.

3. Informations supplémentaires

- Les patients qui ont un tympan perforé ou qui sont sujets à des douleurs auriculaires ne devront utiliser le produit que sous surveillance médicale.
- Le spray Audiol® ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins d'un an, sans l'avis d'un spécialiste.
- L'huile d'olive est un produit naturel, utilisé pour une variété d'applications au quotidien. Ainsi, aucun effet indésirable n'a été signalé avec ce produit ou lorsque ce produit est utilisé avec d'autres médicaments. Toutefois, il est conseillé d'éviter d'utiliser ce produit en cas de sensibilité ou d'allergie aux huiles végétales ou minérales.
- Aucun effet indésirable dangereux n'a été observé lors de l'utilisation de ce produit pendant la grossesse et/ou l'allaitement. Toutefois, il est important de toujours se renseigner auprès de son médecin ou de son pharmacien avant d'utiliser ce produit.
- Aucun effet indésirable n'a été observé en cas de sous-dosage ou de surdosage.
- En cas de réaction allergique, interrompre l'utilisation de ce produit et consulter immédiatement son médecin, son pharmacien, ou son audioprothésiste.

4. Mises en garde

- Audiol® est destiné à être utilisé chez un seul patient.
- Toujours conserver Audiol® en position verticale et à température ambiante.
- Le produit devra être jeté six mois après la première application quotidienne.
- Prière de jeter le produit en respectant les normes des autorités sanitaires locales.
- Ne pas pulvériser à proximité d'une flamme nue.
- Garder tout médicament hors de la portée des enfants.
- Audiol® est uniquement destiné à être utilisé dans le conduit auditif. Ne pas pulvériser près des yeux, du nez ou de la bouche.

Audiol® est un instrument médical de classe 1.

HL Healthcare Ltd,
112-114 Wotton Street, Northwich, CW9 5NW (Angleterre)

Distribué par audine - www.audine.eu/audiol

Audiol® est une marque déposée d'HL Healthcare Ltd.
Notice rédigée en octobre 2014.



Schéma a



Schéma b



Schéma c

