

Audiol[®]

OLIJFOLIESPRAY

NL

Audiol[®] is een eenvoudige en effectieve manier om oorsmeer dunner te maken en het op een natuurlijke manier te verwijderen. Hiermee vermindert u de noodzaak om uw oren te laten uitspuiten, en als het toch eens nodig is, gaat dat gemakkelijker. Audiol[®] heeft een eenvoudig maar uniek doseersysteem, waarmee u een vaste dosis in het buitenoer kunt brengen. Dit is gemakkelijker in het gebruik en voorkomt dat u te veel gebruikt. Knoeien behoort tot het verleden. Klinisch onderzoek toont aan dat olijfolie een droge huid tegengaat en dus jeuk en irritatie vermindert. Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u Audiol[®] gebruikt.

IN DEZE BIJSLUITER:

1. Voordat u een nieuwe fles Audiol[®] gebruikt.
2. Aanwijzingen voor gebruik.
3. Aanvullende informatie.
4. Waarschuwingen.

1. Voordat u een nieuwe fles Audiol[®] gebruikt:

- Warm een nieuwe fles Audiol[®] voor gebruik op in uw handpalm, schud goed en druk de sproeiknop 3 of 4 keer in totdat er spray vrijkomt (zie afbeelding b). Richt de sproeier hierbij niet op uzelf of anderen. Na deze procedure is het product klaar voor gebruik.

2. Aanwijzingen voor gebruik:

- Audiol[®] werkt het beste als u het in uw handpalm opwarmt en het goed schudt voor gebruik.
- Gebruik Audiol[®] volgens de aanwijzingen van uw arts, apotheker, audicien of verpleegkundige.
- Kinderen ouder dan 12 jaar en volwassenen, dienen, als ze hun oren willen laten uitspuiten, gedurende 4 of 5 dagen tweemaal daags 1 of 2 doses Audiol[®] te sprayen.
- Audiol[®] is geschikt voor kinderen van 1 jaar of ouder.
- Uw arts, apotheker, audicien of verpleegkundige kan u aanraden Audiol[®] naderhand eens per week preventief te blijven gebruiken.
- Trek de oorschelp (pinna) naar boven en achteren (zie afbeelding A)
- Houd de fles rechtop met de sproeikop in uw gehoorgang druk de sproeiknop 1 of 2 keer volledig in (zie afbeelding B)
- Masseer zachtjes de tragus, het stukje kraakbeen net voor de gehoorgang (zie afbeelding C)
- Doe dit zo nodig ook voor het andere oor.
- U kunt de sproeiknop na gebruik afnemen, in heet water afspoelen en vervolgens weer terugplaatsen.

3. Aanvullende informatie

- Patiënten met een doorboord trommelvlies of met oorpijn dienen het product alleen onder medisch toezicht te gebruiken.
- Audiol[®]-spray mag zonder medisch advies niet gebruikt worden bij kinderen jonger dan één jaar.
- Olijfolie is een natuurlijk product en wordt dagelijks op tal van manieren gebruikt. Er zijn in die zin geen bijwerkingen bekend voor dit product of voor dit product in combinatie met andere geneesmiddelen. U dient het product niet te gebruiken als u gevoelig of allergisch bent voor plantaardige of minerale olie.
- Er zijn geen schadelijke bijwerkingen bekend als dit product wordt gebruikt tijdens zwangerschap en/of als u borstvoeding geeft. Raadpleeg in deze gevallen echter altijd een arts of apotheker, voordat u het product gebruikt.
- Er zijn geen bijwerkingen bekend als het product in een te hoge of te lage dosering wordt gebruikt.
- Als u een allergische reactie meent waar te nemen, gebruik het product dan niet meer en stel onmiddellijk uw arts, apotheker of audicien op de hoogte.

4. Waarschuwingen

- Audiol[®] is uitsluitend bedoeld voor één patiënt.
- Bewaar Audiol[®] rechtop en bij normale kamertemperatuur.
- Gooi het product zes maanden nadat u het voor het eerst gebruikt heeft, weg.
- Houd u bij het afvoeren aan de aanwijzingen van de plaatselijke autoriteiten.
- Sproei niet in de buurt van open vuur.
- Zorg ervoor dat u alle medicijnen veilig, buiten bereik van kinderen, opbergt.
- Audiol[®] is alleen geschikt voor gebruik in de gehoorgang. Sproei niet in de buurt van ogen, neus of mond.

Audiol[®] is een klasse 1 medisch hulpmiddel.

HL Healthcare Ltd,
112-114 Witton Street, Northwich, CW9 5NW

Gedistribueerd door audine - www.audine.eu/audiol

Audiol[®] is een geregistreerd handelsmerk van HL Healthcare Ltd
Bijsluiter opgesteld Oktober 2014



LAB000943 A002-1

Afbeelding A



Afbeelding B



Afbeelding C

