

Audiol® parfaitement justifié sur le plan médical ! Élimine les bouchons de cérumen et régule le cérumen avec une huile 100% naturelle.

Audiol® ramollit le cérumen, soigne la peau et évite le lavage inutile de tout le conduit auditif et ce, de manière naturelle. La combinaison d'huile (d'olive) pure et sa nébulisation font l'originalité d'Audiol®.

La nébulisation répétée des bouchons de cérumen à l'aide d'une huile pure les ramollit. Pour éviter le lavage inutile des oreilles, il suffit de nébuliser 2 fois par jour 1-2 doses par oreille, 3-4 jours maximum.

L'usage préventif est une fois toutes les 1-2 semaines, y compris lors de port de dispositifs otoplastiques et d'audioprothèses.

Audiol® offre la meilleure alternative, comparativement aux sprays auriculaires d'eau salée d'Audispray et d'Otalgan. En effet, les cristaux de sel dessèchent la peau, le tympan et le cérumen, avec les risques que cela comporte.

Lire le manuel avant emploi, svp.

Audiol®

Spray à l'huile d'olive

- ✓ Ramollit et élimine le cérumen de manière naturelle
- ✓ Réduit le besoin de recourir à une seringue pour effectuer un lavage auriculaire
- ✓ Aide à prévenir/soulager les démangeaisons dans les oreilles

CE



Prix conseillé € 10,95 TVA incluse
200 doses de 0,05ml

- + Approbation médicale de classe 1
- + Usage personnel
- + Prévention de l'accumulation de cérumen
- + Facilite le lavage auriculaire si ce dernier s'impose
- + Indiqué à partir de l'âge de 1 an

Audiol®Swim aide à prévenir la rétention d'eau et les infections auriculaires au cours de la nage, des sports nautiques et des vacances.



Audiol®Swim assure, au cours de la nage et des sports nautiques une protection préventive des oreilles contre le sel, les dépôts et l'otite externe.

Ce spray auriculaire nébulise dans l'oreille une quantité précise (0,05 ml) d'huile d'olive et d'huile de théier et forme une barrière imperméable à l'eau et à la saleté

Son usage préalable assure une durée d'action de 18-48 heures. L'huile 100% naturelle soigne la peau et neutralise les effets de l'eau de mer et de l'eau de piscine.

1-2 doses par oreille suffisent. Utilisable pour les oreilles à partir de l'âge de 1 an.


Le récipient contient 10 ml et > 180 doses.

Audiol®Swim est, en termes de prévention de l'oreille du plongeur, internationalement soutenu par l'organisation DAN (Divers Alert Network).

prix conseillé € 14,95 TVA incluse
200 doses de 0,05ml.

audine distributeur :

- + Le bouchon de natation invisible
- + Approbation médicale de classe 1
- + Usage personnel
- + Avec maintien de manœuvre d'équilibrage en toute sécurité
- + Dans un robuste récipient de rangement
- + Indiqué pour tous sports nautiques
- + Indiqué à partir de l'âge de 1 an

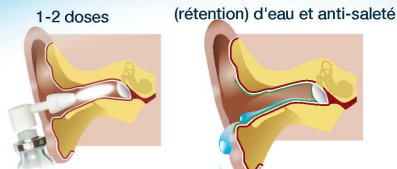

fAudiol FRconsAudine

160404J

Si Audiol®Swim n'est pas disponible, on peut obtenir l'effet souhaité à l'aide de l'huile d'olive, de lavande ou de coco. Plus informations sur le site audine.eu/SWIM